

accumed

Dual Head Stethoscope

雙頭聽診器
型號: EB200



說明手冊

使用前請務必詳閱本
使用說明書並遵照指
示使用

www.accumed.ch

Rossmax Swiss GmbH,
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland




AM_EB200_ZH_wv_1613
INOEB20000000000XX

前言

accumed EB200 雙頭聽診器擁有雙面聽診頭設計能有效地偵測心區音。該產品包括鐘座和膜片的設計，可聽取不同頻率的聲音並帶來精準的聽診聲音品質。此聽診器可用於醫療診斷用途並可使用聽診於心臟及肺部呼吸聲。

產品外觀介紹

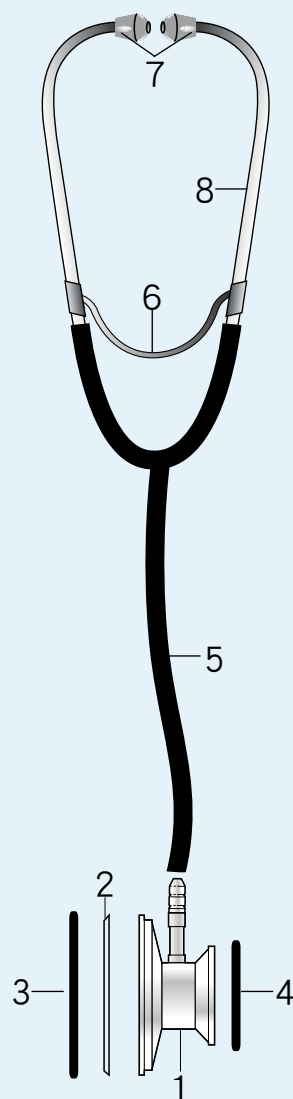

鐘座低頻心音聽診



膜片高頻心音聽診

產品配件組成

號碼	名稱	數量
1	反轉試聽診頭	1
2	膜片	1
3	防寒圈	1
4	防寒圈	1
5	傳聲道耳管	1
6	耳件簧	1
7	耳竇,黑色	2
8	耳管	2

特 色

accumed EB200 反轉式聽診頭設計可使用鐘座和膜片二種模式來聽取不同頻率的聲音，以提供完整的診斷。

- 耳竇: 不含乳膠，柔軟舒適，久戴不痛
- 傳聲道耳管和耳竇採用PVC（聚氯乙烯）材質，絕不含任何乳膠成分，可避免造成您的過敏
- 可調整型的耳件簧
- 鐘座和膜片防寒圈，可避免冰冷的金屬對患者的刺激 及不舒適感

膜 片

用來與皮膚重壓接觸以偵測高頻音心跳聲

鐘 座

用來與皮膚輕輕接觸以偵測低頻音和中頻音的心區雜音

反轉式聽診頭

accumed EB200 配備反轉式的聽診頭，此聽診頭可達到180°水平旋轉交互使用，提供不同模式的聽診選擇

注意: 每次只能使用一種模式聽診

操作方式: 緊握金屬連接桿並旋轉180°以選擇不同模式並確保聽診時聲音的清晰度

警 語

1. 避免將您的聽診器靠近過熱、過冷、有機溶劑和油污
2. 請不要將 accumed EB200 二用聽診器浸泡在任何消毒液或消毒鍋中；如果有必要消毒，請使用70%的酒精小心擦拭
3. 建議在專業醫護人員的指導下使用。
4. 請不要長時間直接暴晒於太陽光底下
5. 請用酒精或中性肥皂水清潔耳管和耳件簧

操作手冊

1. 請確保耳竇緊密地裝入耳管
2. 請小心謹慎地將耳竇放入您的耳道內
3. 輕觸您的手指在膜片上以測試該膜片為使用模式。若非為使用模式，請旋轉聽診頭180°以確保可清楚地聽取聽診器 聲音
4. 聽診前，請確保各配件組裝後的緊密度，以避免影響聽診效果

維護和保養方法

（儲存）單用聽診器應貯存在相對濕度不超過85%，無腐蝕性氣體和通風良好的清潔室內。

生產日期，使用期限

（生產日期）見標籤

（壽命）使用壽命3年